



MediMask

CANADA INC.

CAUTION



1. Read the instructions carefully before use.
2. This product cannot be washed or reused.
3. Not intended for use in procedure environments, ER or medical patient care.
4. Do not use if package is damaged or tampered or beyond the validity period of product.

AVERTISSEMENT

1. Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
2. Ce produit ne peut être ni lavé ni réutilisé.
3. Non destiné à être utilisé dans les environnements de procédures médicales, les salles d'urgence ou lors de soins médicaux aux patients.
4. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou altéré ou si la durée de validité du produit est dépassée.

INSTRUCTIONS FOR USE



1. Gently position the mask to the front of the face. Outer layer is blue.
2. Adjust earloop elastics over ears.
3. Mold nose bar to fit securely around nose bridge.
4. Pull the bottom of the mask down over the chin.

MODE D'EMPLOI

1. Placer le masque doucement sur le visage. La couche extérieure est bleue.
2. Ajuster les bandes élastiques autour des oreilles.
3. Mouler la tige de métal pour qu'elle s'adapte parfaitement à l'arête du nez.
4. Tirer le bas du masque pour couvrir le menton.

MADE IN CANADA BY / FABRIQUÉ AU CANADA PAR :

MediMask Canada Inc. 8868-48 Avenue Edmonton, AB T6E 5L1 Canada